

ELITE Flex Auto Manual

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Table de Flexion Automatique et Manuelle



Stationnaire pour Enfants



Stationnaire



Élévation Réglable
par Pompe



Élévation à Commande
Électrique



Flexion Manuelle



Flexion Automatique



Flexion Automatique et
Manuelle



Hi-Lo



Hi-Lo et Élévation



Hi-Lo et Flexion



Thérapie/Massage

Serial Number	
Model	AUTO-MAN-FLEX
Date	

ELITE Manufacturing, ©2009, All rights Reserved

22 John Street ✕ Hagersville, ON NOA-1HO ✕ 1 800 689•4730, fax 905 768•0822 ✕ www.elite-chirotables.com

Contents

1	<i>Consignes de Sécurité</i>	1
	Avis Important	1
	Consignes de Sécurité Électrique	1
2	<i>Drops et Coussins</i>	2
	Drops	2
	Élévation du Coussin et de l'Appui-Cheville	2
3	<i>Appui-Tête</i>	3
	Appui-Tête Standard	3
	Appui-Tête - Réglage de la Position	5
	Appui-Tête à Double Drop en Option - Utilisation du Drop à Genouillère	6
	Notre appui-tête à double drop est capable de mouvement vers l'avant et vertical.	6
	Appui-Tête à Double Drop en Option - Utilisation du Drop Vers l'Avant	8
	Les images suivantes montrent la fonction du drop vers l'avant.	8
	Appui-Tête HP-Flex	10
	Appui-Tête HP-Flex-L	11
	Installation du Porte-Rouleau	11
4	<i>Thoracique Démontable</i>	12
	Thoracique Démontable - Débrayage du Démontable	12
	Les images suivants montrent la fonction du thoracique démontable.. . . .	12
	Thoracique Démontable - Utilisation du Drop	14
	Les images suivantes montrent la fonction du drop du thoracique démontable en option.. . . .	14
5	<i>Table de Flexion Automatique et Manuelle</i>	16
	Schéma de la Table.	17
	Conversion à la Flexion Manuelle - Exposé Général	18
	Conversion à la Flexion Automatique - Exposé Général	18
	Conversion à la Flexion Automatique - Pas à Pas	19
	Conversion à Flexion Manuelle - Pas à Pas	20
	Fonction de Flexion Manuelle - Pas à Pas	21

	Élévation de la Table (en option)	22
	Flexion Latérale de la Table	22
	Distraction de la Table (en option)	23
	Installation des Sangles de Flexion.	23
	Caractéristiques Techniques de la Table	23
6	<i>Entretien & Assistance</i>	24
	Liste de Pièces	24
	Tous Modèles.	24
	Modèle de Flexion Automatique	24
	Conseils d'Entretien et de Soins	25
	Remplacement des Fusibles de la Boîte de Commande	26
7	<i>Garantie</i>	27
	Politique de Remplacement	27

1 Consignes de Sécurité

Veillez lire attentivement les Consignes de Sécurité et les Modes d'Emploi dans cette guide avant d'utiliser votre nouvelle table d'ELITE. Le non respect des consignes pourrait entraîner des blessures.

Avis Important

Pour éviter les blessures, il faut que les docteurs et les clients gardent les mains, les doigts et les pieds loin de la table pendant l'élévation ou l'abaissement de la table.

Les mains du client devraient rester sur l'Appui-Bras.

Il faut interdire au client de monter ou descendre la table pendant l'élévation ou l'abaissement de la table.

Les clients devraient monter ou descendre la table lorsque la table reste à la position la plus basse et immobile.

Jamais laisser la table sans surveillance ou de l'exploitation en présence des clients ou des enfants.

Consignes de Sécurité Électrique

Si la table est équipée d'un moteur électrique, il ne faut brancher la table qu'à une prise de courant à contact de mise à la terre et branchée à un interrupteur de circuit de commande à fusible.

S'assurer que tous les cordons d'alimentation sont en bon état.


Il faut que les cordons d'alimentation soient loin des points de striction et des parties mobiles, surtout la Table d'Élévation 'EA' à commande électrique, la Table Hi-Lo, la Table Hi-Lo avec Élévation, et la Table de Flexion.

2 Drops et Coussins

Pour les commandes sur la partie centrale de la table, non compris l'appui-tête.


Drops

La tension de drop est réglée en tournant le bouton de réglage de tension de drop. Tourner en sens horaire pour serrer, et en sens antihoraire pour desserrer.

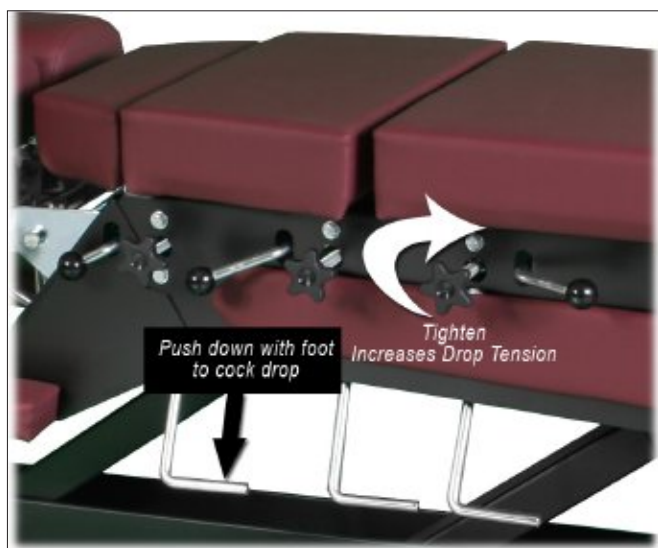

Élévation du Coussin et de l'Appui-Chevilles

Pour achever l'élévation du coussin ou de l'appui-cheville, mettre les doigts sous le cadre de coussin et lever jusqu'à l'angle désiré. Pour les faire retourner à la position horizontale, tirer en haut le levier de débrayage de coussin.

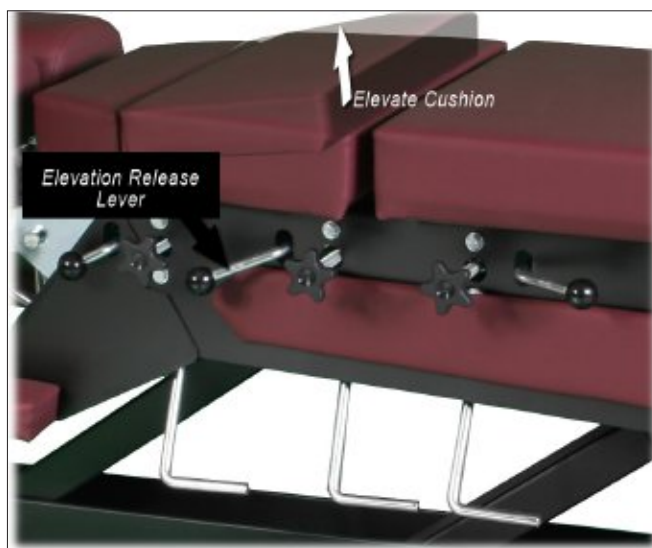

Les réglages de tension sont très sensibles.


Recommandation: Faire un demi-tour et tester pour achever la tension désirée.

3 Appui-Tête

Elite vous offre un choix varié d'appuis-têtes.

Appui-Tête Standard

Notre appui-tête multidirectionnel standard y compris les fonctions de basculement, d'élévation et d'écartement. L'appui-tête est aussi fourni d'un drop cervical capable de mouvement vers l'avant ou vertical.

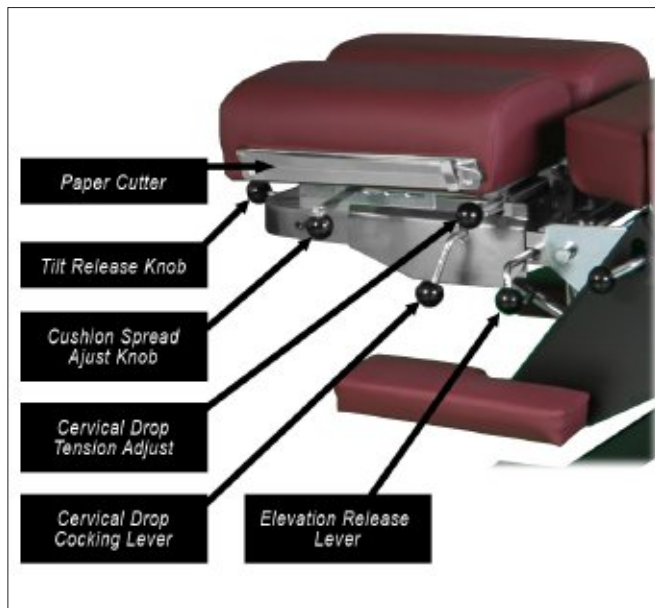

Massicot

Utiliser le massicot pour déchirer/couper le papier de l'appui-tête.

Bouton de Débrayage d'Inclinaison

Pour lever l'appui-tête à l'angle désiré, tirer en haut le support d'appui-tête jusqu'à l'inclinaison désirée. Pour abaisser l'inclinaison, appuyer le bouton de débrayage d'inclinaison et régler l'appui-tête à l'angle désiré.

Bouton de Réglage d'Écartement de Coussin

Lever le bouton légèrement et positionner vers l'avant ou en arrière pour atteindre l'écartement désiré.

Bouton de Réglage de Tension de Drop Cervical

Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour plus de tension et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour moins de tension.

Levier d'Armement de Drop Cervical

Appuyer sur le levier pour armer le drop.

Levier de Dégagement d'Élévation

Pour abaisser le coussin arrière de l'appui-tête, tirer en haut et débrayer. Pour lever l'arrière de l'appui-tête, mettre les mains sous les deux côtés de la base du coussin facial et lever à la hauteur désirée.

Appui-Tête - Réglage de la Position

Les images ci-dessous montrent les réglages de position variés pour l'appui-tête standard.

1. Position Neutre



2. Pousser le bouton



3. Incliner vers le bas



4. Appui-tête incliné vers le bas




5. Tenir le levier et incliner vers le haut



6. Appui-tête incliné vers le haut



7. Lever l'arrière de l'appui-tête

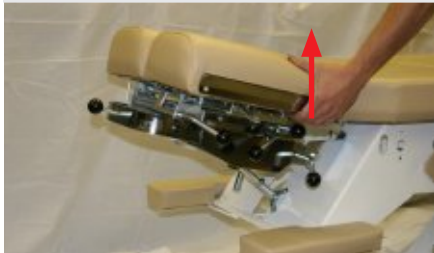

8. Arrière surélevé



9. Lever l'avant de l'appui-tête



10. Appui-tête surélevé



11. Abaisser l'arrière de l'appui-tête



12. Arrière en position basse



13. Abaisser l'avant de l'appui-tête



14. Débrayer le bouton




15. En position neutre encore une fois



Appui-Tête à Double Drop en Option - Utilisation du Drop à Genouillère

Notre appui-tête à double drop est capable de mouvement vers l'avant et vertical.

Les images suivantes montrent comment achever l'action de drop à genouillère.

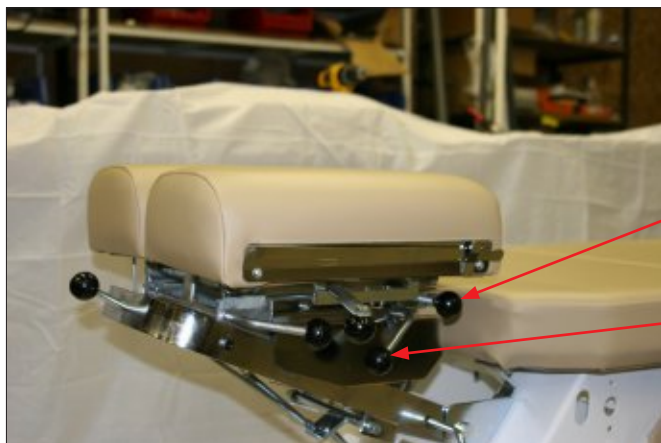

Drop à Genouillère (Vertical) - Mise en Marche

Suivre les étapes ci-dessous pour achever l'action de drop à genouillère.

Mettre la tension de drop au réglage désiré. Tourner le bouton en sens horaire pour plus de tension et en sens antihoraire pour moins de tension.

Après avoir réglé la tension, il faut utiliser le levier d'armement de drop à genouillère.



Drop à Genouillère- Levier d'Armement

Tenir le levier d'armement de drop à genouillère.

.



Drop à Genouillère -Armement du Drop

Tirer le levier vers vous pour armer le drop.



Drop à Genouillère- Déploiement du Drop

Après avoir armé le drop, pousser vers l'avant pour le débrayer.




Drop à Genouillère - Drop Déployé

Appui-tête débraiera à la position désarmée.

Appui-Tête à Double Drop en Option - Utilisation du Drop Vers l'Avant

Les images suivantes montrent la fonction du drop vers l'avant.

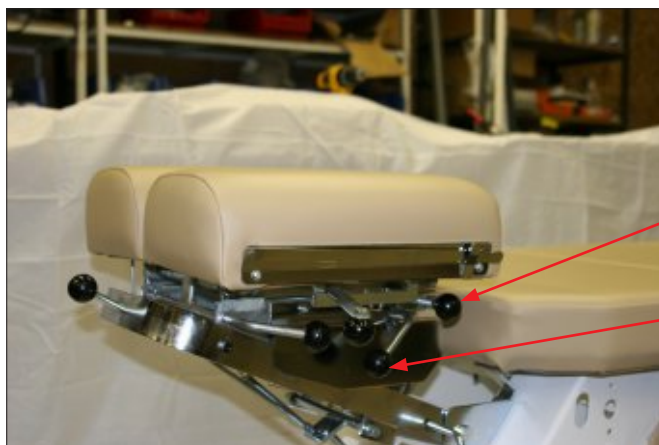

Drop Vers l'Avant - Mise en Marche

Suivre les étapes ci-dessous pour achever un drop vers l'avant.

Mettre la tension du drop au réglage désiré. Tourner le bouton en sens horaire pour plus de tension et en sens antihoraire pour moins de tension.

Après avoir réglé la tension, il faut utiliser le levier d'armement de drop à genouillère.



Drop Vers l'Avant - Levier d'Armement

Tenir le levier d'armement de drop à genouillère.




Drop Vers l'Avant - Armement du Drop

Tirer le levier vers vous pour armer le drop.




Drop Vers l'Avant - Armement du Drop

Ensuite tirer le levier d'armement du drop vers l'avant.

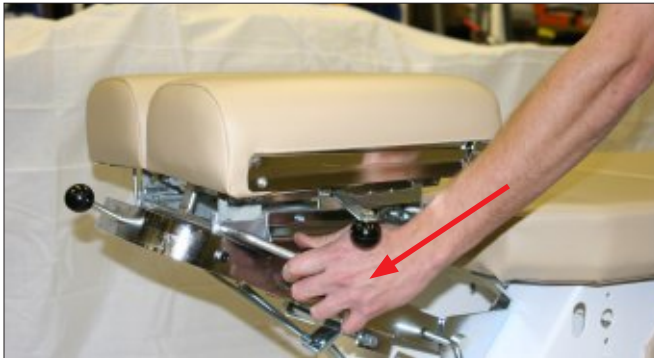

Drop Vers l'Avant - Armement du Drop

Pousser le levier vers l'avant pour armer le drop.

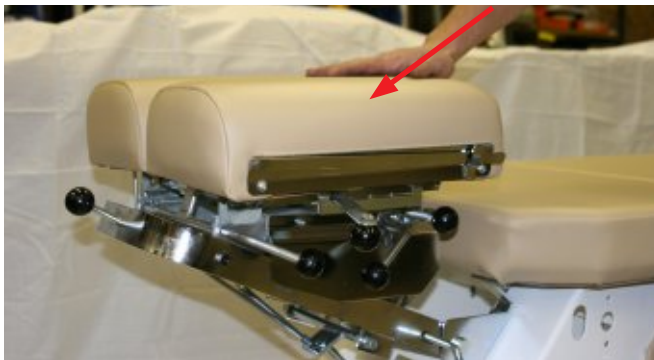

Drop Vers l'Avant - Déploiement du Drop

Après avoir armé le drop, pousser vers l'avant pour le débrayer.



Drop Vers l'Avant - Drop Déployé

Appui-tête débraiera à la position désarmée.

Appui-Tête HP-Flex

Notre nouveau appui-tête de flexion/distraction est fourni de toutes les fonctions de notre appui-tête multidirectionnel standard, y compris les fonctions de flexion (la traction d'axe longitudinale et la flexion). Dans les images suivantes, le levier de flexion n'est pas montré pour les rendre moins compliqués. En fait, pour utiliser les fonctions de flexion, il faut insérer le levier de flexion dans l'appui-tête de flexion. Il faut aussi utiliser les sangles de l'appui-tête.

Veuillez voir le mode d'emploi de l'appui-tête standard pour la fonctionnement des fonctions standards.

Traction de l'Axe Longitudinal

Avec le client sur la table, insérer le levier de flexion et attacher les sangles de flexion. Puis, suivant les directives d'exploitation, utiliser le levier de flexion pour achever l'action de traction d'axe longitudinal.



Flexion

Avec le client sur la table, insérer le levier de flexion et attacher les sangles de flexion. Puis, suivant les directives d'exploitation, utiliser le levier de flexion pour achever l'action de flexion.



Élévation

L'appui-tête peut être élevé et abaissé.



Appui-Tête HP-Flex-L

Notre appui-tête de flexion/distraction et traction d'axe longitudinal est fourni de toutes les fonctions de notre appui-tête multidirectionnel standard et de l'appui-tête HP-Flex, y compris aussi les fonctions de flexion latérale.

Veuillez voir le mode d'emploi de l'appui-tête standard et du HP-Flex pour les modalités d'opération.

Flexion Latérale

Avec le client sur la table, insérer le levier de flexion et attacher les sangles de flexion. Puis, suivant les directives d'exploitation, utiliser le levier de flexion pour achever



Installation du Porte-Rouleau

Les images suivantes montrent l'installation du porte-rouleau de papier sur l'appui-tête.




4 Thoracique Démontable

Les tables d'Elite peut être commandées avec une partie thoracique démontable en option. L'image ci-dessous montre une table avec le drop démontable en option.

Thoracique Démontable - Débrayage du Démontable

Les images suivantes montrent la fonction du thoracique démontable.

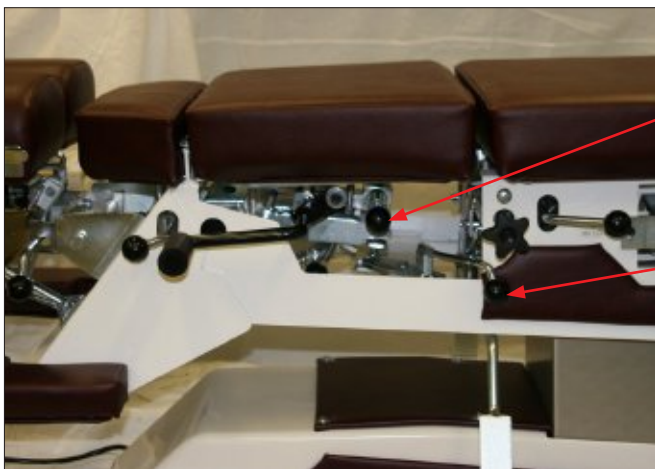

Démontable - Bouton de Débrayage

La tension de démontable peut être réglée en tournant le bouton de réglage de tension en sens horaire pour plus de tension ou en sens antihoraire pour moins de tension.

Le bouton de débrayage de démontable montré ici est en position verrouillée.




Démontable - Débrayage du Démontable

Pousser le bouton de débrayage du démontable vers l'avant de la table pour débrayer le démontable.



Démontable - Débrayé

Après avoir poussé le bouton de dégagement vers l'avant, le démontable sera débrayé.

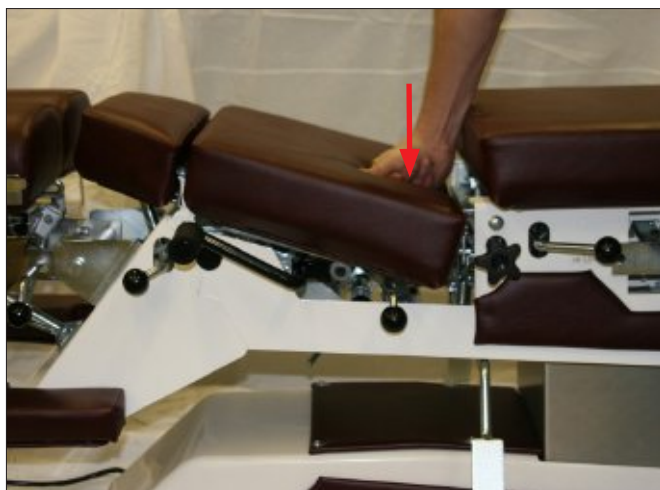


Démontable - Testage du Démontable

Voici le démontable en action.

Thoracique Démontable - Utilisation du Drop

Les images suivantes montrent la fonction du drop du thoracique démontable en option.

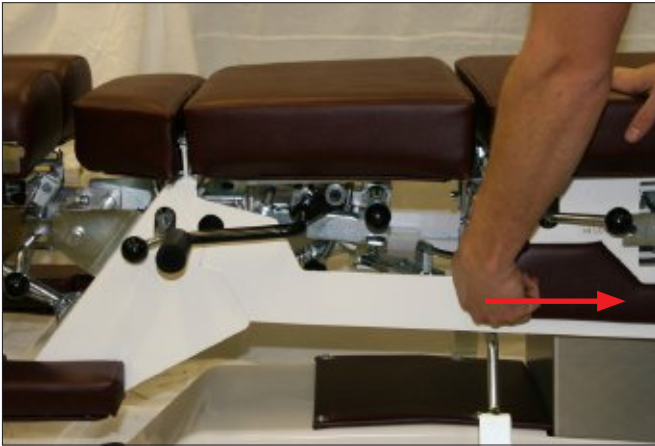

Démontable - Verrouillage du Drop

Pousser le bouton de débrayage du démontable vers l'arrière de la table pour verrouiller le démontable. Dès qu'il soit verrouillé le coussin ne débraiera pas et sera prêt à achever des drops.



Démontable - Levier d'Armement du Drop

Suivre les étapes ci-dessous pour achever l'action de drop.

Tourner le bouton en sens horaire pour plus de tension et en sens antihoraire pour moins de tension.



Démontable - Armement du Drop

Trouver le levier d'armement du drop et pousser vers le bas pour armer le drop.



Démontable - Drop Armé

Le drop montre ici est armé.



Démontable - Déploiement du Drop

Après avoir été poussé vers le bas, le drop dégagera.




Démontable - Drop Déployé

Le coussin de thoracique dégagera jusqu'à la position désarmée.

5 Table de Flexion Automatique et Manuelle

Boîte de Commande

La Table de Flexion Automatique et Manuelle a une boîte de commande numérique qui est utilisée pour actionner la fonction de Flexion Automatique. Il y a deux modes d'action. Flexion minutée, dont la durée de l'action de flexion est un intervalle de temps déterminé, ou flexion manuelle, dont le chiropraticien commande la durée de l'action de flexion. Il y a aussi un cadran situé sur la boîte de commande pour régler la vitesse de flexion.

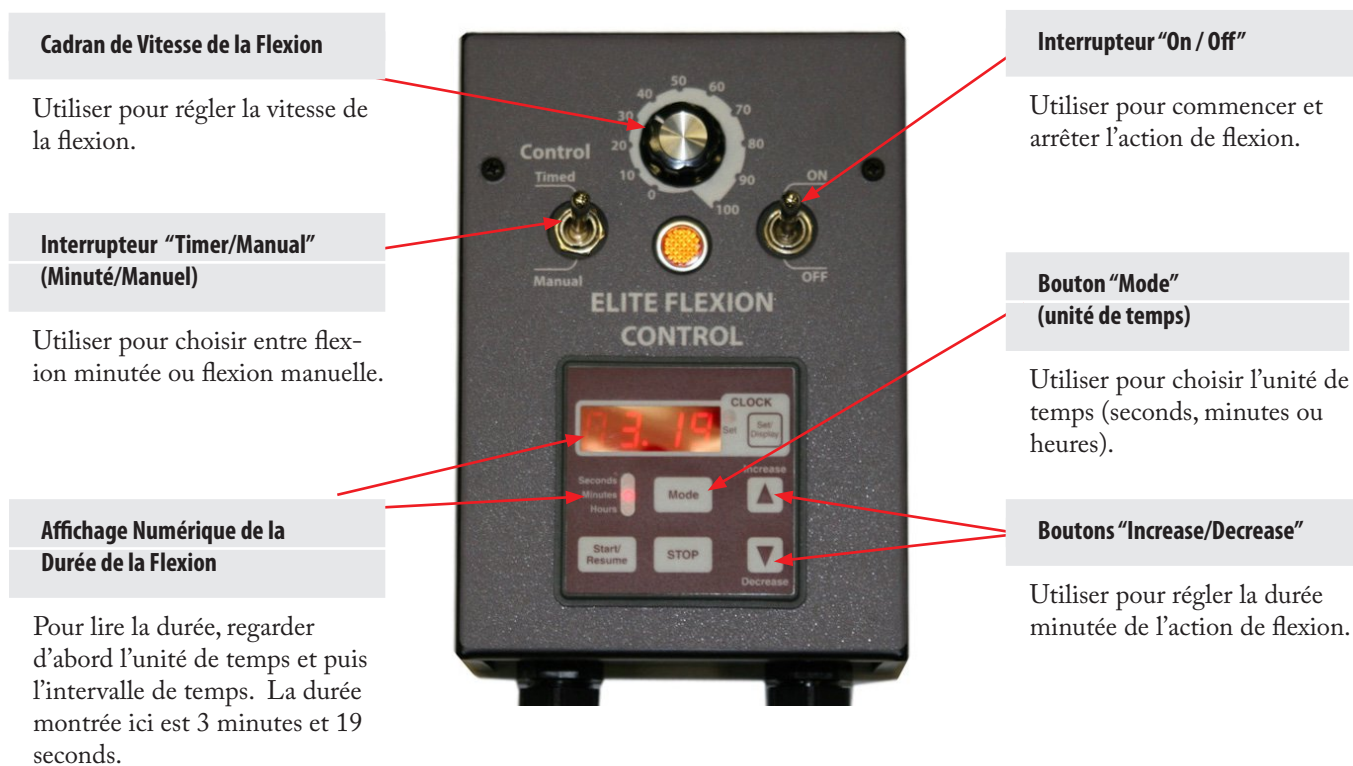


Action Minutée - Flexion Automatique:

1. Passer le bouton 'Timed/Manual' (Minuté/Manuel) à 'Timed' (Minuté).
2. Passer l'interrupteur 'On & Off' à 'On'.
3. Choisir l'unité de temps désirée avec le bouton 'Mode' (seconds, minutes ou heures).
4. Choisir l'intervalle de temps en utilisant les boutons 'Increase & Decrease'. Ne pas oublier que le temps est affiché en unités spécifiées par les lumières à côté du bouton 'Mode' (seconds, minutes ou heures).
5. Régler la vitesse de la flexion en tournant le Cadran de Vitesse.

Commande Manuelle - Flexion Automatique:

1. Passer le bouton 'Timer/Manual' (Minuté/Manuel) à 'Manual' (Manuel).
2. Régler la vitesse de la flexion en tournant le Cadran de Vitesse.
3. Passer l'interrupteur 'On & Off' à 'On' et l'action de Flexion commencera.
4. Pour arrêter l'action de Flexion, passer l'interrupteur 'On & Off' à 'Off'.

Schéma de la Table

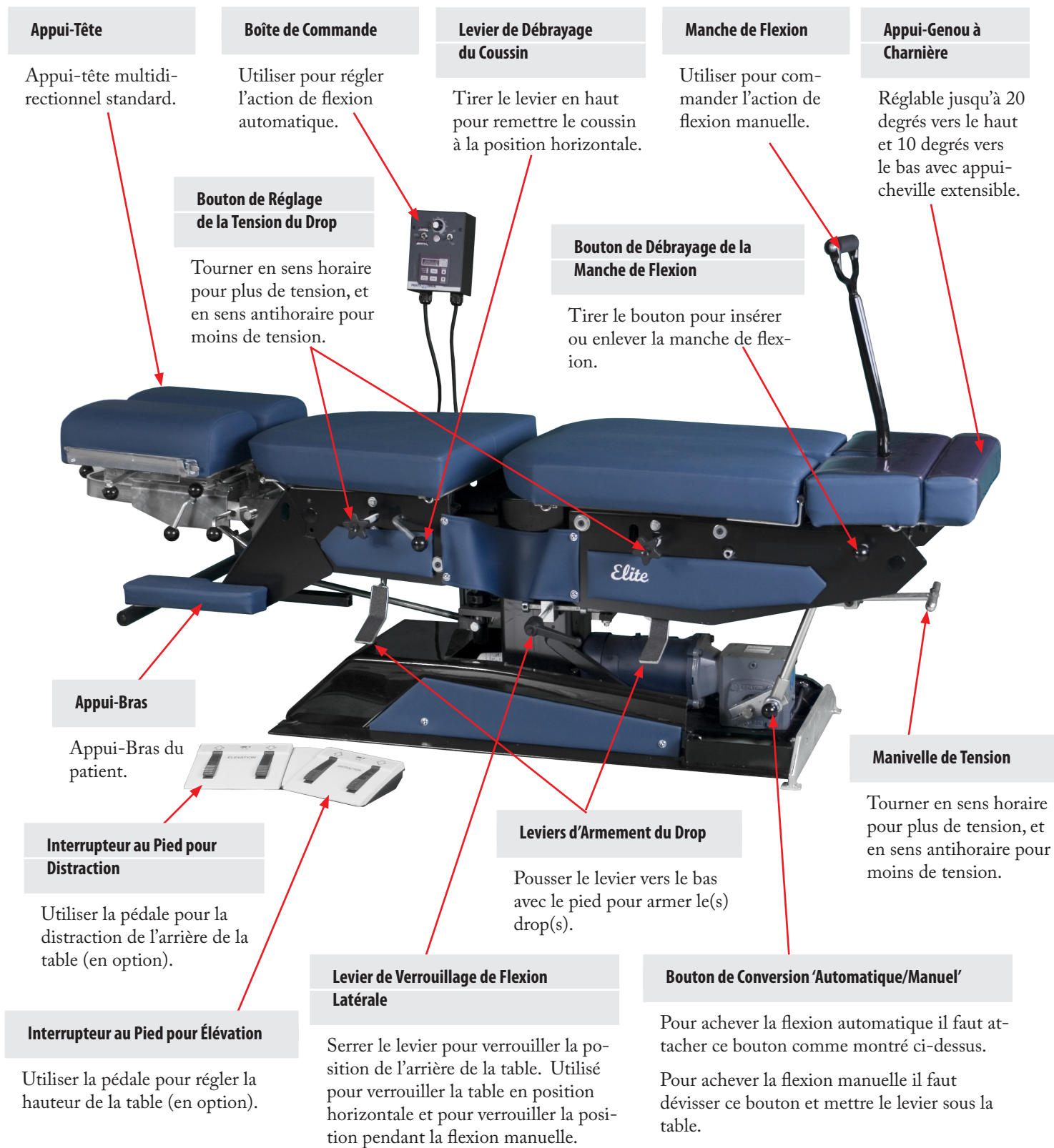

Conversion à la Flexion Manuelle - Exposé Général

Suivre les étapes ci-dessous pour convertir de la Flexion Automatique à la Flexion Manuelle.

Conversion d'Automatique à Manuelle

1. S'assurer que l'interrupteur 'on/off' de la Boîte de Commande soit à la position 'off' et que la table soit débranchée.
2. Dévisser le bouton de conversion 'Automatic/Manual' et mettre le levier sous la table comme illustré ci-dessous.
3. Insérer le Levier de Flexion.



Conversion à la Flexion Automatique - Exposé Général

Suivre les étapes ci-dessous pour convertir de la Flexion Manuelle à la Flexion Automatique.

Conversion de Manuelle à Automatique

1. Tenir le levier de 'Automatic/Manual Conversion' mis en sécurité sous la table et l'attacher au support de moteur de flexion comme illustré ci-dessus
2. Enlever le levier de flexion.
3. Régler la boîte de commande à flexion manuelle ou à flexion minutée et démarrer l'action de flexion.




Conversion à la Flexion Automatique – Pas à Pas

Suivre les étapes ci-dessous pour convertir de la Flexion Manuelle à la Flexion Automatique.


Étape #1

Enlever le levier de flexion arrimé sous la table.

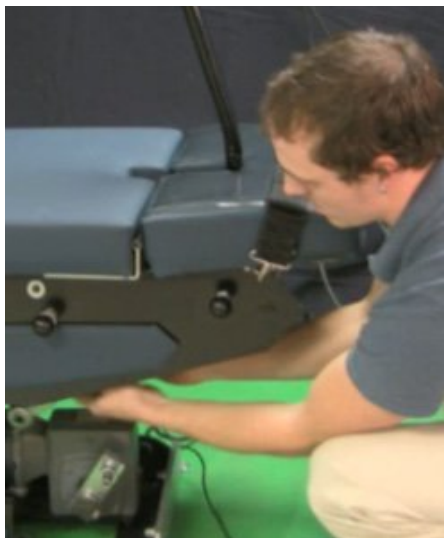


Étape #2

Attacher le levier au support de moteur de flexion.

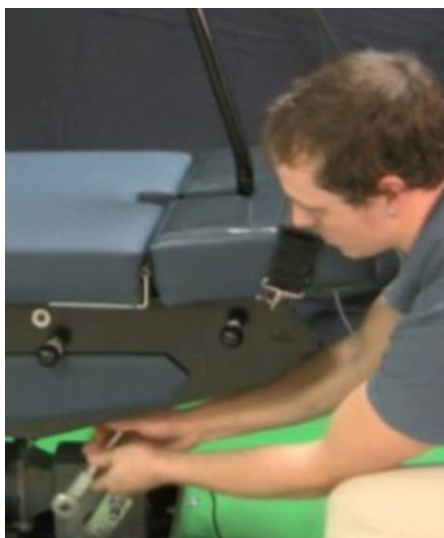


Étape #3

Enlever le bouton du porte-bouton en le tournant en sens antihoraire.

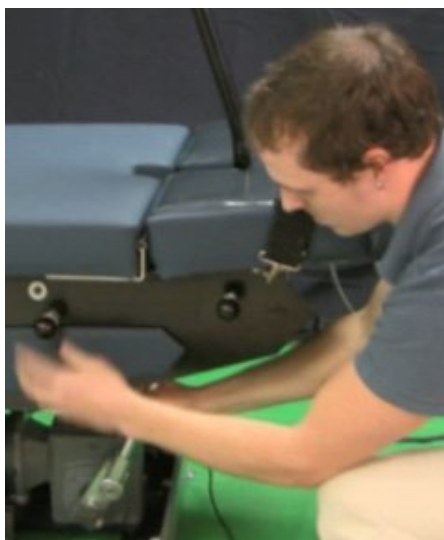


Étape #4

Fixer le levier de flexion au support de moteur de flexion avec le bouton en tournant en sens horaire.

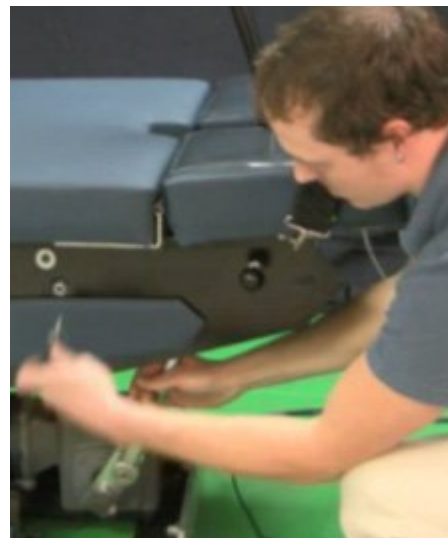


Étape #5

Continuer à tourner le bouton en sens horaire pour le serrer bien.

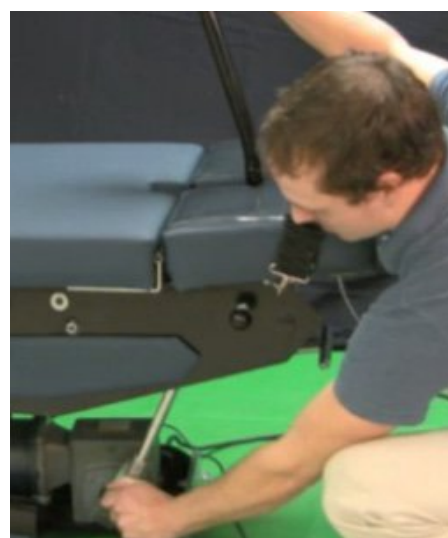

Étape #6

À ce point la table est prête pour l'action de flexion automatique.

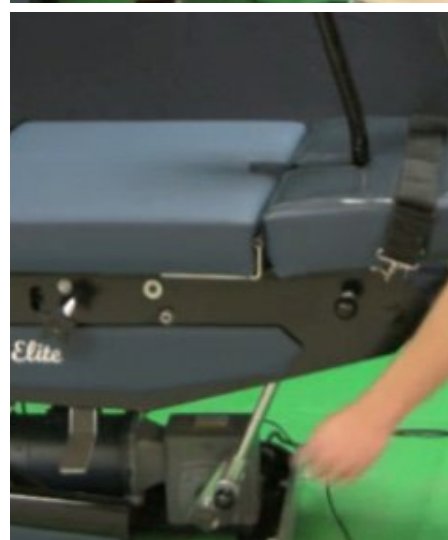


Conversion à Flexion Manuelle - Pas à Pas

Suivre les étapes ci-dessous pour convertir de la Flexion Automatique à la Flexion Manuelle.


Étape #1

Dévisser le bouton de conversion 'Automatic/Manual' du support de moteur de flexion.

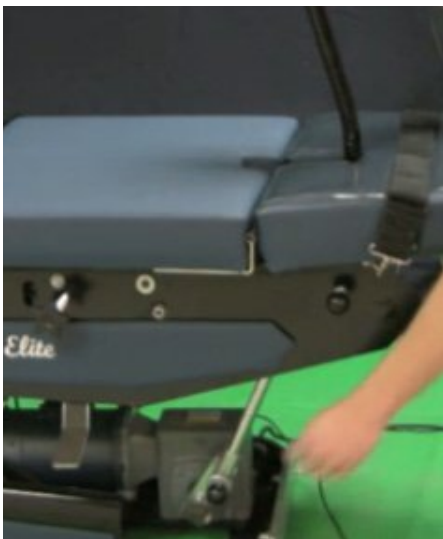


Étape #2

Il faut tourner le bouton en sens antihoraire pour l'enlever.

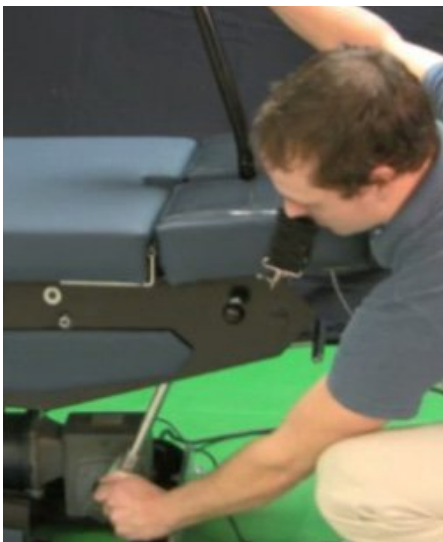


Étape #3

Mettre le bouton qui vient d'être dévissé sur le porte-bouton situé sur le côté de la table comme illustré.

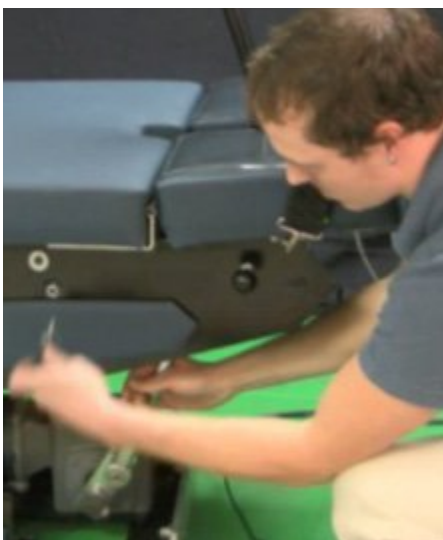


Étape #4

Le bouton montré ici a été mis le porte-bouton en le vissant en sens horaire.

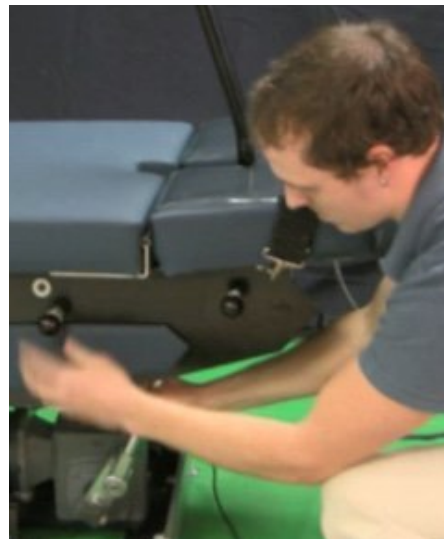


Étape #5

Mettre le levier de flexion automatique en sécurité sous la table. Il y a un support pour le tenir en place.

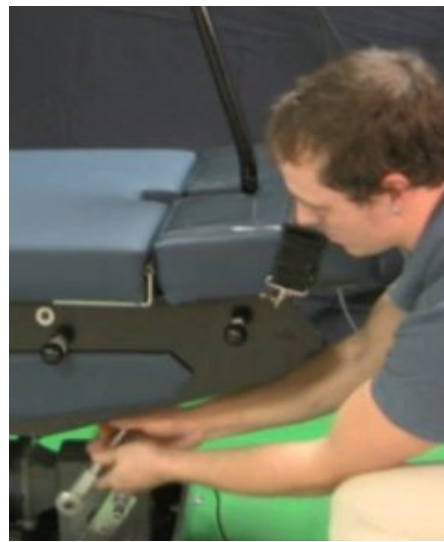

Étape #6

Dès que le levier de flexion a été mis en sécurité, la table est prête pour l'action de flexion manuelle.

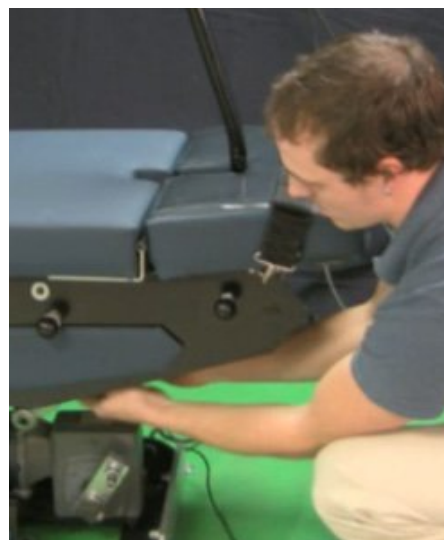

Fonction de Flexion Manuelle - Pas à Pas

Les images suivantes montrent les étapes pour achever la fonction de flexion manuelle. La tension de la flexion peut être réglée à l'arrière de la table par manivelle ou, si la table est équipée de réglage de la tension électrique en option, elle peut être réglée par pédale.

1. Table en position verrouillée



2. Desserrer le verrou de flexion



3. Flexion vers le bas



4. Tenir le verrou de flexion latérale



5. Desserrer le verrou latéral



6. Table en position déverrouillée



7. Capable d'exécuter la figure 8



8. Flexion vers le bas et à gauche



9. Flexion vers le bas et à droite



10. Tenir le verrou de flexion



11. Serrer le verrou de flexion




12. Tenir le verrou de flexion latérale



13. Serrer le verrou latéral



14. Tirer le bouton de déclenchement

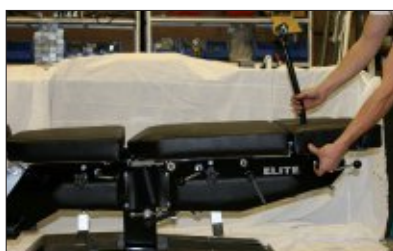

15. Enlever le levier de flexion



Élévation de la Table (en option)

Si la table est équipée de la fonction d'élévation, la hauteur de la table peut être réglée en tapant sur un interrupteur au pied.

Table en Position Basse



Table en Position Haute



Flexion Latérale de la Table

La fonction de flexion latérale est possible à l'avant et à l'arrière de la table.

Arrière et Avant de la Table en Flexion vers la Droite



Arrière et Avant de la Table en Flexion vers la Gauche



Distraction de la Table (en option)

Si la table est équipée de la fonction de distraction électrique, la distraction de l'arrière de la table est possible.

Table en Position de Distraction

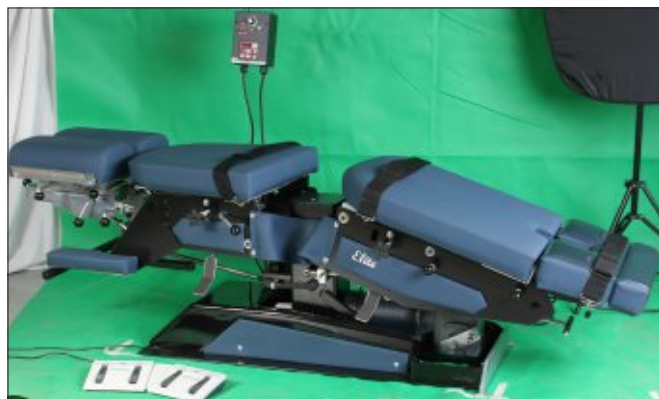


Table Pas en Position de Distraction



Installation des Sangles de Flexion

Les sangles de flexion s'attachent sur les boucles situées sous les coussins comme illustré ci-dessous.



Caractéristiques Techniques de la Table

Flex Automatique Manuelle	
Poids	408 lbs / 185 kg
Poids Brut Réel (Palette)	458 lbs / 207 kg
Poids Brut Réel (Caisse)	608 lbs / 275 kg

6 Entretien & Assistance

Les tables chiropratique d'ELITE ont été appelées “La Machine Performante de l'Industrie” et, bien que nous soyons très fiers de la fonction supérieure et des besoins minimes de chaque modèle, les pièces de rechange sont disponibles si nécessaire.

Liste de Pièces

Il y a une quantité minimum de commande pour chaque pièce commandée. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre concessionnaire des tables ELITE ou ELITE Manufacturing, 1-800-689-4730.

Tous Modèles

1. Ressorts du drop (1 par drop)
2. Bille d'acier du drop (2 par drop)
3. Levier de tension du drop cervical avec bouton
4. Levier de tension du drop thoracique/lombaire/pelvien avec bouton
5. Prolongateur de la tige de commande du drop
6. Assemblage du drop thoracique
7. Assemblage du drop lombaire
8. Assemblage du drop pelvien
9. Appui-tête avec drop cervical (complet)
10. Assemblage du massicot d'appui-tête
11. Assemblage du porte-papier d'appui-tête
12. Porte-rouleau de papier (bois)
13. Pédale du drop
14. Axe de chape (grand)
15. Axe de chape (petit)
16. Clavette d'axe de chape
17. Moteur d'Élévation
18. Interrupteur au Pied

Modèle de Flexion Automatique

19. Manche de Flexion
20. Moteur de Flexion
21. Boîte de Commande Numérique

Conseils d'Entretien et de Soin

Soins du Tissu d'Ameublement

Pour prolonger la vie du tissu d'ameublement (Whisper, Burkshire et cuir) il est recommandé d'essuyer les coussins souvent avec un chiffon humide contenant une solution d'eau et de détergent doux.

Localisation du Numéro de Série

Le numéro de série se trouve à l'arrière de la table comme montré ci-dessous. Il faut avoir ce numéro en recevant le service à la clientèle d'ELITE.



Déplacement de la Table

Il est recommandé d'avoir deux personnes en déplaçant la table. Une personne pour chaque bout de la table. Les images suivantes montrent comment déplacer la table. Il faut reconnaître que la table est lourde. Il faut être confortable avec la masse de la table avant d'essayer de la déplacer.

La personne levant l'avant de la table devrait pousser le Bouton de Dégagement d'Inclinaison d'appui-tête pour faire verrouiller le mouvement vers le haut de l'appui-tête. L'appui-tête ne doit pas bouger en mettant de la force vers le haut.



La personne levant l'arrière de la table devrait lever en tirant les leviers comme montré ci-dessous.



Remplacement des Fusibles de la Boîte de Commande



En cas de problème avec le moteur de la table, il faut d'abord remplacer les fusibles dans la boîte de commande. Suivre les étapes ci-dessous.



Emplacement de la Boîte de Commande

Débrancher la table de la prise murale. Incliner la table comme montré et déposer sur le côté pour dévoiler la Boîte de Commande. Ensuite trouver la boîte grise qui s'attache au câble d'alimentation.

Ouverture du Compartiment à Fusibles

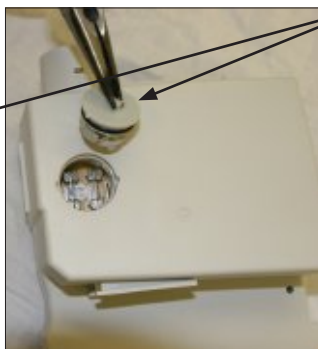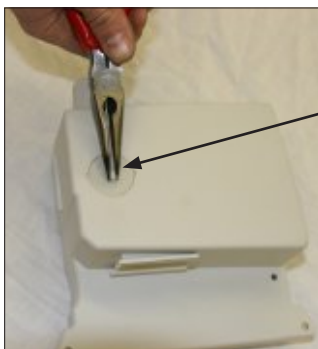

Tirer le bouchon de la boîte à fusibles de la Boîte à Commande utilisant une pince à bec effilé.

*Avis – Laisser la Boîte de Commande dans la table (comme montré dans l'image précédente). Les images utilisées ici montrent une boîte de commande qui a été enlevée pour la clarté d'illustration.



Remplacement des Fusibles

Il y a deux fusibles de rechange dans le bouchon qui vient d'être enlevé.

Remplacer les deux fusibles dans la boîte de commande avec les deux fusibles de rechange. Remettre le bouchon dans la boîte. Mettre la table encore debout et brancher dans la prise murale. Essayer d'utiliser la table encore une fois pour voir si le problème a été rectifié.

AVIS : Si les fusibles de rechange ont été déjà utilisés, il faut contacter ELITE pour en commander plus.

7 Garantie

Tous les produits (et leurs parties), fabriqués et vendus par Elite Manufacturing (1180396 Ontario, Inc.) sont garantis d'être sans défaut de fabrication ou de matériel de deux ans à compter de la date d'expédition.

Si une déclaration de sinistre est faite pendant la période de garantie, Elite Manufacturing réparera ou remplacera, à son option, le produit ou la partie défectueux.

Le client doit obtenir l'autorisation d'Elite Manufacturing avant de retourner les parties défectueuses ou avant d'avoir une réparation faite par personnel hors d'Elite (à l'exception des concessionnaires autorisés par Elite). Les coûts de main-d'œuvre associés avec l'enlèvement ou le remplacement des parties défectueuses ne sont pas couverts par cette garantie.

Les défauts résultant de l'usage impropre, de l'abus, des actes de Dieu, des accidents, de l'emploi abusif, ou de la contrainte, des modifications ou d'aucune autre chose sans relation à Elite Manufacturing et hors de son contrôle raisonnable ne sont pas couverts.

Elite Manufacturing (ou leurs agents), ne peut en aucun cas être tenu pour la perte d'usage, du revenu, ou du profit, ou pour les dommages indirects.

Le rembourrage et le tissu d'ameublement ne sont pas couverts par cette garantie. Pour prolonger la vie du tissu d'ameublement il est recommandé d'essuyer les coussins souvent avec un chiffon humide contenant une solution d'eau et de détergent doux.

Politique de Remplacement

ELITE MANUFACTURING

Division of 1180396 Ontario Inc.

1. Les commandes annulées en écriture avant d'être expédiées par Elite seront remboursées.
2. Un bien qui a été déjà expédié ou qui est en train d'être expédié par Elite sera sous réserve des frais de réassortiment de 20%, en plus des frais d'expédition et de retour de ce bien
3. Elite Manufacturing se réserve le droit d'examiner un bien retourné avant de donner un remboursement, et le droit aussi d'ajouter des frais en plus des frais de réassortiment et d'expédition s'il y a aucun dommage de défaut ou partie manquante.
4. Si Elite a reçu un paiement d'un client, Elite remboursera la différence après les frais ci-dessus.